

Před použitím si důkladně přečtěte návod k použití.**Popis:**

- 1. Spínač ON/OFF** – slouží k zapnutí napájení zařízení.
- 2. USB-C port** – slouží k nabíjení baterie nabíječkou 5 V, 2 A (min), lze nabíjet i při provozu zařízení.
- 3. Bílá LED** – indikuje aktivitu; po startu 3x rychle zabliká a poté se rozsvítí; pomalé blikání indikuje nízký stav baterie.
- 4. Zelená LED** – indikuje plné nabití baterie.
- 5. Červená LED** – indikuje nabíjení baterie.

1. Příprava k použití

- A. Nabíjení zařízení: Před použitím připojte trenažér pomocí USB-C kabelu k napájení a nechte jej plně nabít. Zelená LED dioda indikuje plné nabití.
- B. Umístění trenažéru: Postavte trenažér na suchý, pevný, plochý povrch.
- C. Připojení hadiček: Připojte hadičky (vlození hadičky do spojky a zatlačení) k příslušným spojkám na trenažéru, poranění a jako poslední k vaku s tekutinou. Ujistěte se, že jsou pevně zajištěny.
- D. Zapnutí trenažéru: Posuňte spínač do polohy "ON". Bílá LED dioda třikrát rychle zabliká, což značí aktivaci zařízení. Poté zůstane svítit, což signalizuje, že je trenažér připraven k použití.
- E. Pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům nebo poškození hadičky nebo spojky, a při úniku přístroj ihned vypněte a před dalším použitím je nejprve vyměňte.

2. Použití trenažéru

- A. Simulace krvácení: Po zapnutí trenažéru se automaticky spustí čerpadlo, což simuluje aktivní krvácení.
- B. Provádění wound packingu: Při provádění techniky wound packing zasuňte gázu do simulovaného poranění. Trenažér vyhodnocuje tlak aplikovaný na zdroj krvácení.
- C. Zastavení krvácení: Jakmile je dosaženo definovaného tlaku, čerpadlo se automaticky vypne, což signalizuje úspěšnou zástavu krvácení.
- D. Obnovení krvácení: Pokud tlak poklesne pod definovanou úroveň, čerpadlo se znovu spustí a krvácení pokračuje.

3. Nabíjení zařízení

Během provozu: Pokud bílá LED dioda začne pomalu blikat (nízký stav baterie), připojte trenažér k napájení pomocí USB-C kabelu. Červená LED dioda indikuje, že se zařízení nabíjí. Trenažér lze používat i během nabíjení.

Plné nabití: Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se zelená LED dioda. Doporučuje se zařízení plně nabít před dalším použitím.

4. Ukončení trenažéru

- A. Vypnutí trenažéru: Posuňte spínač do polohy "OFF". Bílá LED dioda zhasne, což značí deaktivaci zařízení.
- B. Odpojení hadičky od rezervoáru.

5. Údržba a čištění

- A. Čištění trenažéru a hadiček: Po každém použití odpojte hadice a důkladně je propláchněte čistou vodou a nechte dobře vyschnout v pokojové teplotě 20 – 28 °C. Krabičku otřete vlhkým hadříkem.
- B. Čištění rezervoáru: Omývejte jemným roztokem mýdla a vody, teplota vody pro čištění nesmí přesáhnout 60 °C/140 °F. Po každém použití důkladně vypláchněte a nechte dobře vyschnout v pokojové teplotě 20 – 28 °C.
- C. Skladování: Uložte simBLEED™ na suché a chladné místo mimo přímé sluneční světlo.
- D. Nabíjení: Pravidelně kontrolujte stav nabití baterie a před delším skladováním ji zcela nabijte.
- E. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte ředidlo, benzen, alkohol ani jiné chemikálie.

6. Bezpečnostní pokyny

- A. Výrobek má vestavěnou dobíjecí baterii a nesmí být vystaven působení ohně nebo slunečního záření. V opačném případě může dojít k úniku elektrolytu a k přehřátí či explozi baterie.
- B. Nikdy neopravujte tento výrobek sami, ale kontaktujte technickou podporu výrobce.
- C. Nabíjecí kabel, který je připojený k výrobku, nesmí být umístěn ve vlhku nebo ve vodě.
- D. Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu, bez viditelných poškození.
- E. Zařízení je zakázáno provozovat v teplotách stejných a nižších, než je 0 °C nebo v teplotách přesahujících 40 °C.
- F. Vyhněte se příliš hustým nebo viskózním tekutinám, které mohou způsobit narušení chodu čerpadla, jeho výkon anebo ucpání hadiček.
- G. Chraňte výrobek před pádem a prudkými nárazy.
- H. V případě chřastění obsahu trenažéru, nespouštějte zařízení a kontaktujte technickou podporu výrobce.
- CH. V případě nadměrného zahřátí, trenažéru, nespouštějte zařízení a kontaktujte technickou podporu výrobce.

7. Řešení obtíží

CHYBA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Bílá LED dioda nesvítí a trenažér čerpá tekutinu.	Závada LED diody nebo řídicí jednotky.	Kontaktujte technickou podporu výrobce.
Bílá LED dioda nesvítí a trenažér nečerpá tekutinu.	Vybitý zabudovaný akumulátor.	Zkuste nabít akumulátor. Pokud závada nezmizí, kontaktujte technickou podporu výrobce.
	Závada řídicí jednotky.	Kontaktujte technickou podporu výrobce.
Trenažér nečerpá tekutinu.	Hadička přivádějící tekutinu do trenažéru není v kontaktu s tekutinou.	Doplňte vak nebo přelijte tekutinu ve vaku, směrem k připojené hadičce.
	Hadička přivádějící tekutinu do trenažéru je porušena a má v sobě díru nasávající vzduch.	Zkontrolujte hadičku a v případě porušení, vyměňte hadičku za neporušenou.
	Hadička přivádějící tekutinu do trenažéru není řádně připojena do rychlospojky trenažéru.	Rozpojte a opět spojte hadičku s rychlospojkou.
	Porucha funkčnosti čerpadla.	Kontaktujte technickou podporu výrobce.
Nedochází k detekci tlaku a čerpadlo stále běží.	Netěsnost vnitřního okruhu.	Odpojit poranění a zkusit ověřit funkčnost přitlačením prstu na konec hadičky vedoucí z trenažéru. Při přetrvávající závadě kontaktovat technickou podporu výrobce.
	Závada řídicí jednotky.	



Výrobce:

simULmed s.r.o., Přístavní 507/51, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 21393842, info@simulmed.cz, www.simbleed.com

